

● كيفية أخذ القياس لتفصيل حذاء

- يتم أخذ القياس لغرض طلب حذاء مفصل حسب احتياجاتكم باتباع أحد الأساليب التالية:
- أخذ القياس بنفسك عن طريق اتباع الخطوات البسيطة التالية.
- أخذ القياس عن طريق مختص بألبسة القدم الطبية.

لأخذ القياس بنفسك اتبع هذه الخطوات التالية:

أ- التجهيز والأدوات اللازمة

- قلم رصاص.
- شريط قياس مرن (يؤخذ القياس بالمليمتر).
- أوراق.
- ماسح ضوئي (سكانر).
- نموذج أخذ المقاس مطبوعاً على ورقة A4 او معبأً إلكترونياً لكل قدم <https://gencogrup.com/ar/custom-made-shoes>

ب- رسم محيط القدم

يفضل أخذ القياسات واقفاً بالوضع الطبيعي حيث تكون كل قدم على ورقة جاهزة للرسم ووزن الجسم موزعاً على كلتا القدمين مع استرخاء لأصابع القدم، في هذه الحالة وجود مساعد لك في الرسم يكون مفضلاً.


قم برسم محيط القدم مع وضع إشارة عند البروز العظمي للمشط عند أكبر وأصغر أصابع القدم مع الانتباه إلى أن يبقى القلم قائماً قدر الإمكان أثناء رسم المحيط لزيادة دقة القياس كما في الشكل (1).



(1)

ت- أخذ القياسات اللازمة


- قم بأخذ قياس محيط الامشاط كما هو موضح بالشكل (٢)
- ثم قم بتسجيل المقاس على نموذج أخذ المقاس.

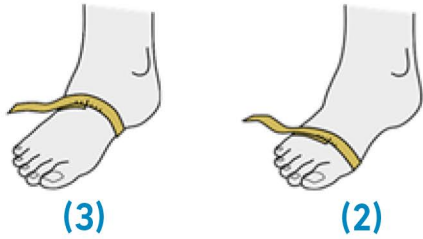

(3)

(2)

- ثم قم بقياس محيط الرخم كما في الشكل (٣) حيث يمرر شريط القياس حول منتصف قوس القدم وأعلى نقطة في مشط القدم.

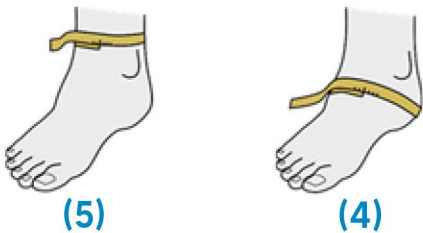

(5)

(4)

- ثم قم بأخذ القياس حول عقب القدم ومفصل الكاحل من الأمام كما في الشكل (٤)

- ثم قم بأخذ قياس المحيط عند اضيقت منطقة فوق بروز عظام الكاحل كما في الشكل (٥)

بعد الانتهاء من تسجيل القياسات الكاملة في نموذج أخذ المقاس (أو على الأقل تسجيل القياسات المطلوبة المبينة بنجمة حمراء) قم بتصوير جميع الأوراق عن طريق ماسح ضوئي (سكانر) ثم أرسلها الى بريدنا الإلكتروني info@gencogrup.com وسنقوم بالتواصل معك بوقت قريب.